

注射のしかた





1 消毒します。



アルコール綿で注射する場所とそのまわりを広めに消毒します。



2 針カバーを外します。

片手で外筒を持ち、もう一方の手で針カバーをまっすぐ引いて取り外してください。ご自分で針カバーを外せない場合は補助具を使用してください。

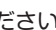- 針カバーを外す際や注射器を刺す際、
- ・内筒(右図 ) を押ししたり、引いたりしないでください。
- ・青色部分(右図 ) に触れないでください。

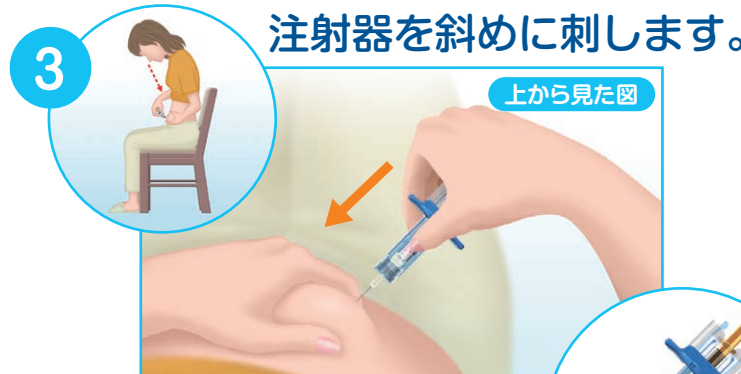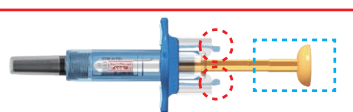

3 注射器を斜めに刺します。

消毒した場所の皮膚を軽くつまんで、注射針を斜めにすばやく刺します。



上から見た図



4 内筒を押します。


注射器をしっかり持ち、内筒をゆっくりと、最後までしっかり押し切ります。

最後までしっかり押し切る

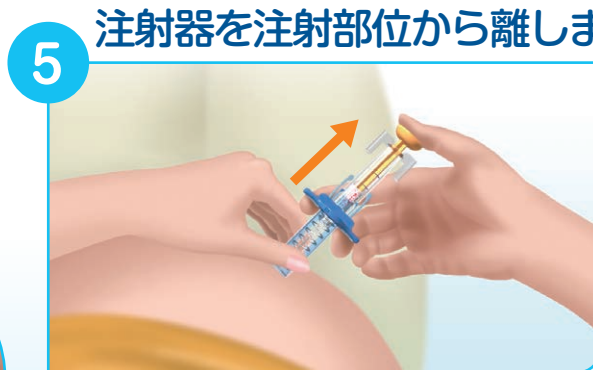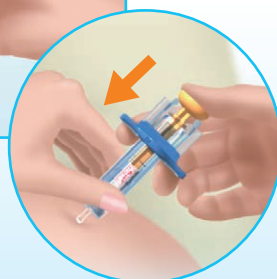

5 注射器を注射部位から離します。

注射器内の薬液が空になったら、内筒を押している指の力をゆっくりとゆるめてください。針が皮膚から抜けて自動的にカバーされます。

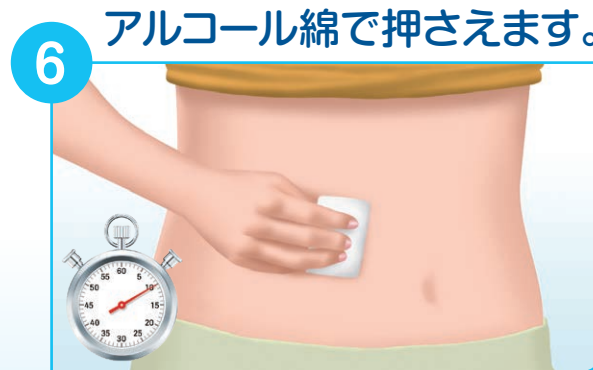


6 アルコール綿で押さえます。

注射針を抜いた後、アルコール綿で10秒程度軽く押さえてください。使い終わった注射器は、使用済み注射器入れに廃棄してください。

注射する場所(部位)

腹部(おなか)

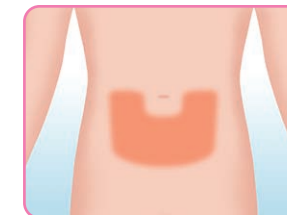

大腿部(太もも)



注射する場所は、腹部(おなか)、大腿部(太もも)です。
※へその周り5cm程度は避けて注射してください。

上腕部(二の腕)



ご家族の方が注射される場合は、上腕部(二の腕)に注射することもできます。

注射が終わったら

1 使用済み注射器入れに収納します。



フタを開け、使用済み注射器を収納してください。ロックされるまでしっかりフタを閉めてください。
廃棄の方法については病院・医院の指示にしたがってください。

2 オレンシア®・ノートの「体調チェックシート」に記録を付けます。

体調チェックシートは、体調の自己管理だけでなく、主治医や看護師にとっても参考になります。診察時にお持ちください。



注射のしかたについてお困りのことがありましたら、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。

オレンシアサポートセンター

0120-13-3779

24時間対応・通話無料

ブリistol・マイヤーズ スクイブ 株式会社 小野薬品工業株式会社

※注射の準備ほか、詳しい手順については「自己注射ガイドブック」をご参照ください。


注射のしかた

1 補助具を用意し消毒します。



補助具をアルコール綿で消毒します。白いレバーを開いてレバーの内側も消毒してください。

2 注射器をセットします。

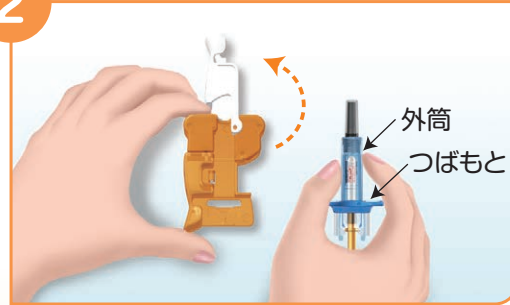


補助具は必ず**白いレバーを180°回転させて**開いてください。必ず、**外筒**を持って注射器をセットしてください。このとき、注射器のつばもとが溝にしっかりとハマるようにしてください。

補助具に注射器をセットする際、青色部分(下図)に触れないでください。



3 レバーを戻します。

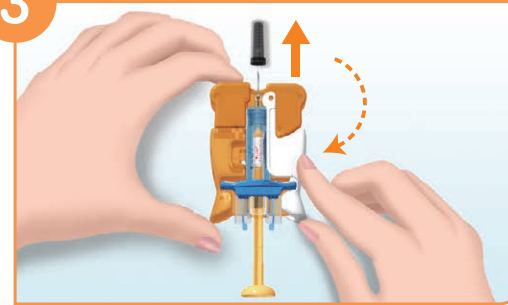

白いレバーを回転させて、元の位置に戻してください。すると、レバーを元に戻すと同時に、針カバーがゆっくりと外れます。

補助具を使用しても針カバーが外れなかった場合には、**白いレバーを戻さず**に、手で針カバーを外してください。手でも外れない場合には、無理に外そうとせず本剤を受け取られた医療機関へお申し出ください。

4 消毒します。



アルコール綿で注射する場所とそのまわりを広めに消毒します。

5 注射針をまっすぐに刺します。




上から見た図

針が刺さったかどうか確認してから内筒を押します。



消毒した場所の皮膚を軽くつまんで、注射針をまっすぐに刺します。

6 注射します。

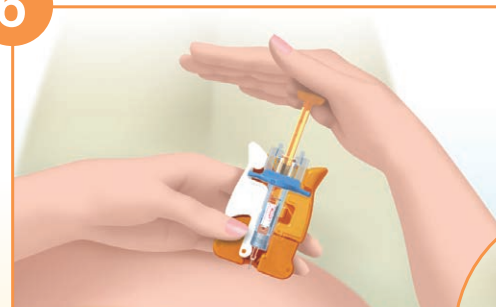

人さし指で内筒を押すことができる場合は、それでも構いません。



補助具をしっかりと持ち、もう一方の手で内筒をゆっくりと最後までしっかり押し切ってください。

7 注射器と補助具を注射部位から離します。




注射器内の薬液が空になったら、内筒を押している力をゆっくりとゆるめてください。針が皮膚から抜け、自動的にカバーされます。

8 アルコール綿で押さえます。



注射針を抜いた後、アルコール綿で10秒程度軽く押さえてください。


9 注射器を外します。

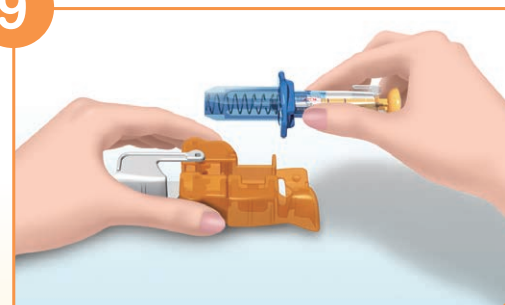

白いレバーを開け、注射器を外して使用済み注射器入れに廃棄してください。

注射が終わったら

1 使用済み注射器入れに収納します。

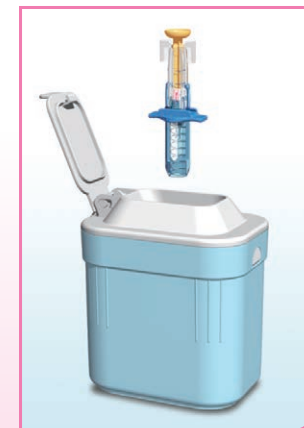

フタを開け、使用済み注射器を収納してください。ロックされるまでしっかりフタを閉めてください。廃棄の方法については病院・医院の指示にしたがってください。

2 オレンシア®・ノートの「体調チェックシート」に記録を付けます。

体調チェックシートは、体調の自己管理だけでなく、主治医や看護師にとっても参考になります。診察時にお持ちください。

